

KIT ANTISVERSAMENTO LIQUIDI BIOLOGICI

Destinazione

Per assorbire ed addensare
sversamenti di liquidi biologici.

Assorbire ed addensare i liquidi biologici, anche nei contenitori per il loro smaltimento, facilitandone la raccolta e lo smaltimento:

Sala Operatoria: durante interventi chirurgici.

Sala parto: rottura delle acque della paziente.

Ambulanza: raccolta liquidi riversati sul pavimento del mezzo di soccorso.

Anatomia Patologica: occlusione degli orifizi del paziente.

Pronto Soccorso: raccolta liquidi riversati sul pavimento in casi di emergenza/urgenza.

Oncologia/Urologia: raccolta vomito/urine/deiezioni.

Malattie Infettive: raccolta di liquidi a forte rischio infettivo.

Laboratorio Analisi: raccolta liquidi analizzati in eccesso.

Igiene Reparti: raccolta liquidi riversati su pavimenti e superfici.

RIMOLSAP

Polvere gelificante polimerica ad elevata capacità idroscopica in grado di assorbire grandissime quantità di liquidi a base acquosa.

A contatto con i liquidi si gonfia rapidamente agevolando la raccolta e la rimozione del liquido disperso.

Permettere di raccogliere facilmente anche sangue, vomito ed essudati.

COMPOSIZIONE

Contenitore



Valigetta PP cm 24 x 18 x 4,6 h - Colore nero

Materiale assorbente



n° 2 strofinacci assorbenti in microfibra di polipropilene calandrati termicamente - Dim. foglio 40x40 cm
cod. FQ4040AZ



n°2 Polimero superassorbente gelificante per liquidi acquosi
Flacone quadrato con tappo a vite e sottotappo da gr. 50

Materiali di raccolta e pulizia



n° 2 spatole



n°2 sacchi PLT cm. 22+12 (soffietto) x 55 h per la raccolta dei rifiuti in polietilene sp. 15.00 - colore bianco con "R" nera e simbolo rischio biologico su sfondo giallo



n°2 fascette di chiusura per sacchi

LINEA MEDICALE

KIT056MED



Pratico kit specifico per gestire autonomamente, in maniera efficiente e rapida piccoli sversamenti. Estremamente compatto e resistente.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto va usato tal quale sul liquido da raccogliere considerando che 50 gr di prodotto possono assorbire oltre a 2 litri di liquido. Attendere il completo rigonfiamento del prodotto fino ad ottenere un composto gelatinoso e procedere con l'asportazione. Particolarmente indicato per pubbliche assistenze, case di riposo, pompe funebri, scuole, uffici, officine, ambulanze. Inoltre può essere utilizzato per l'assorbimento dei più svariati liquidi industriali a base acquosa.

Protezione delle persone

Aprire il Kit antisversamento, indossare i guanti.

Valutazione della situazione

Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato.

Eventuale contenimento/delimitazione ed arresto della fuoriuscita

Se persiste, bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori.

Bonifica

Versare la polvere superassorbente direttamente sulla zona di spandimento del liquido direttamente dal barattolo. Attendere la reazione di gelificazione del liquido. Raccogliere lo spandimento gelificato in totale sicurezza avvalendosi di normali supporti di raccolta come le spatoline monouso e il sacco per gli scarti.

Dispositivi di protezione e D.P.I.



n° 1 paio di guanti monouso in nitrile Azzurro
(EN 420; EN 374-3 (GKL); EN 374-2; EN 455 AQL 1.5)
cod. 020 001 054

Modulistica



n°1 foglio istruzioni
n°1 mod. registrazioni incidente con foglio dotazione del kit/scadenza/consumo materiali